

白歯の着色方法



Step	Colour Liquid	Colour application	buccal	occlusal
1	A3 			
2	A3 			
3	A3 			
4	Cervical A <small>※カラーリキッドプレッタアクアアレルのみ</small> 			
5	Incisal blue 			
6	Incisal grey 			
7	Incisal violet 			
8	Orange 1 Brown 2 			

- Colour application は塗布する回数を示します。カラーリキッドを筆に充分染み込ませてから塗布してください。
- 着色したジルコニアブロックはジルコンランプ（別売り）を使用して乾燥させてから焼結してください。
- 乾燥時間目安：単冠 15 分～、3 本ブリッジ 30 分～、フルマウス 60 分以上

前歯の着色方法



Step	Colour Liquid	Colour application	labial	palatal
1	A3 			
2	A3 			
3	A3 			
4	Cervical A <small>※カラーリキッド プレッタアクアレルのみ</small> 			
5	Incisal blue 			
6	Incisal grey 			
7	Incisal violet 			
8	Orange 1 Brown 2 			

- Colour application は塗布する回数を示します。カラーリキッドを筆に充分染み込ませてから塗布してください。
- 着色したジルコニアブロックはジルコンランプ（別売り）を使用して乾燥させてから焼結してください。
- 乾燥時間目安：単冠 15 分～、3 本ブリッジ 30 分～、フルマウス 60 分以上

プレッタアンテリア白歯の着色方法（浸漬テクニック）



1 使用前によく振ってください。



2 プラスチックのピンセットを使用して約1秒、カラーリキッドプレッタアンテリアアクアレルに浸します。



3 カラーリキッドプレッタアンテリアアクアレルに浸した後、すぐに水の中に浸します。



4 プレッタアンテリアを水の中で1~2秒動かします。



5 ペーパーで軽くたたくようにして水分を取り除きます。



6 残りの水分をペーパーでよくふき取ってください。

HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

MILLED WITH THE
M1 WET HEAVY METAL
CAD/CAM SYSTEM



■販売名：CAD/CAMシステム M1
■医療機器届出番号：14B1X90003ZZ0032
ミリングユニット M1 ウェットヘビー&スキャナー S600 ARTI V3

製造販売業者・製造業者

Toshin Dental Supply

トーシンデンタル株式会社 〒212-0057 神奈川県川崎市幸区北加瀬 2-5-12
TEL 044-201-6171 MAIL mail@toshin-dental.com <https://www.toshin-dental.com>